

こんなときには小児用パッド!!

● 1～8歳未満、25kg未満の小児 ● ガイドライン2005対応のAED ●



① 小児用パッドの袋を開けて、パッドを取り出します。




② AEDのふたを開けて、成人用パッドをコネクタから抜きます。




「意識・呼吸を確認してください。
胸を裸にして、AEDのふたから四角い袋を取り出してください。
袋を破いてパッドを取り出してください。
パッドの一つをシートから剥がして、図のように右胸に貼ってください。
もう一つのパッドをシートから剥がして、左わき腹に貼ってください。」

③ 小児用パッドをコネクタにつなぎます。

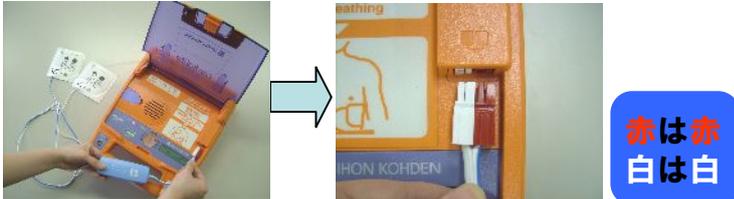

④ お子様の胸と背中にパッドを貼ります。

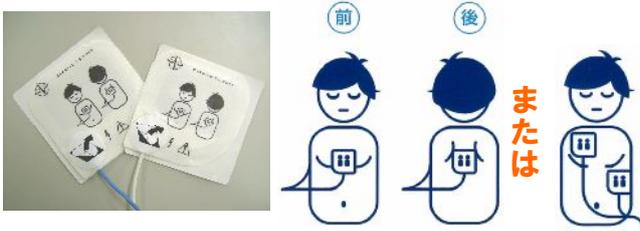

「体に触らないでください。
心電図を調べています。」

⑤ AEDの音声ガイドに従います。

電気ショックが必要な場合

「電気ショックが必要です。充電しています。
体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。」



電気ショックが必要な場合

「体に触っても大丈夫です。
直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」

